





Gebbruiksaanwijzing voor DERMAPAK®2000


- Reinig de aangetaste nagel met een alcoholdoekje. Indien de nagel zwaar bevuild is dient men vooraf met water en zeep te reinigen en dan pas het alcoholdoekje te gebruiken.

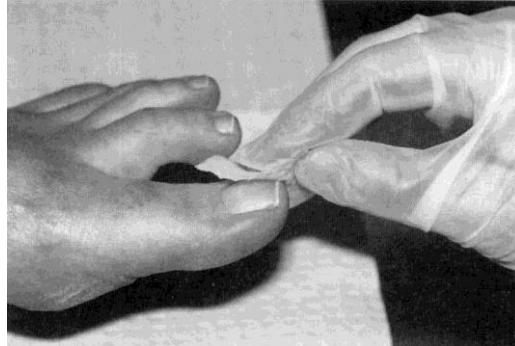

- Knip de nagel zo ver mogelijk zonder hinder voor de patient te veroorzaken

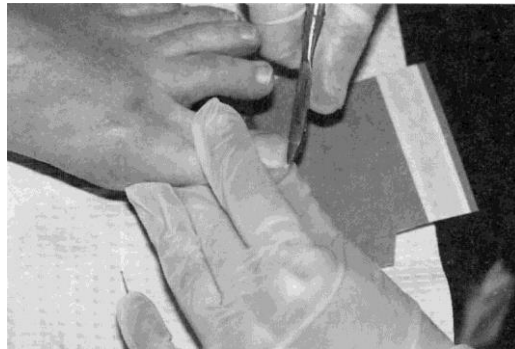

- Plaats de geopende Dermapak® 2000 onder de nagel. Flap A wordt geopend

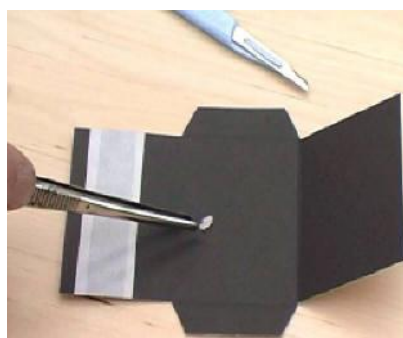


- Knip een stukje aangetaste nagel af met een schaar. Afgesneden stukjes dienen de ganze dikte van de nagel te omvatten en zo ver mogelijk van de nageltip verwijderd afgenomen.


***Identificeer éénduidig met de naam of kleef een labosticker
en schrijf de aard van het staal op het recipiënt***



Alternatief :

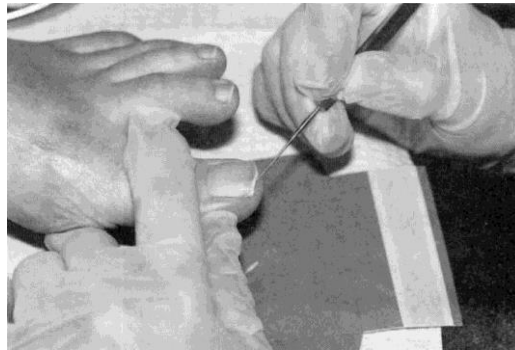

- Men kan debris van onder de nagel verwijderen door schrapen met een curette of spatula.

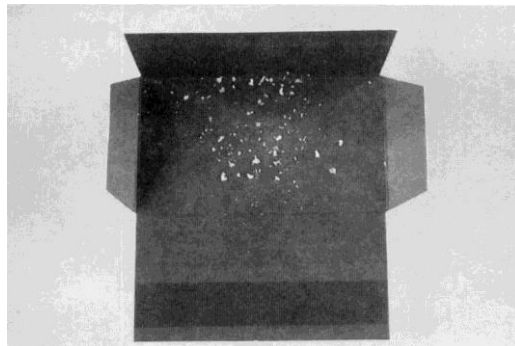

Verpak het materiaal voor verzending



- Orienteer Dermapak® 2000 zodanig dat de kleefstrip van U verwijderd is.
- **Vouw eerst Flap A naar beneden en vervolgens de zijflaps B en C**
- Verwijder de kleefstrip, vouw daarna Flap D en druk stevig aan.
- Vul de gegevens op keerzijde zo volledig mogelijk in.
- **Gebruik geen kleefband of nietjes om af te sluiten.**
- Plaats in het bijbehorend plastic zakje, sluit dit zorgvuldig af. Verstuur samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier in de verzendenveloppe.

***Identificeer éénduidig met de naam of kleef een labosticker
en schrijf de aard van het staal op het recipiënt***